


Tam dişsiz hastalarda implant yerleřtirmek için kendi protezinden sten

Öncelikle elimize büyükçe bir parça silikon ölçü alıp karıştıarak işe başlıyoruz. Yapacağımız işlem silikondan bir mufla hazırlayıp, hastamızın total protezinin bir kopyasını çıkarmak ve elde edilen kopya protezin üzerinde dişlerden rehberlik olarak implantların yerleřtirilmesi gereken yerleri belirlemek..

 %77 küçültüldü



2560 x 1920 (1.21mb)

Ardından muflanın alt tablası olarak kullanacağımız silikonu, tezgahın üzerine yerleştiriyoruz ve total protezi bu silikonun içine gömüyoruz.

 %77 küçültüldü



2560 x 1920 (1.21mb)


Silikonumuz sertleştikten sonra muflamızın üst kapağını kapattığımızda tam yerine oturması için Anahtar kilit noktalarını oluşturuyoruz.

 %65 küçültüldü



1697 x 1537 (802.24k)


Üzerine kapatacađımız silikon kapađın yapışmaması için tüm yüzeye vazelin uyguluyoruz..

 %77 küçültüldü



2560 x 1920 (1.19mb)


Ardından yine büyükçe bir silikonla muflamızın üst kapağını hazırlıyoruz

 %49 küçültüldü



1169 x 933 (254.31k)


Sertleştikten sonra üst kapağı ayırıyoruz , protezi muflamıza zarar vermeden çıkarıyoruz...

 %77 küçültüldü



2560 x 1920 (1.21mb)

Sonra yeterli miktarda soguk tamir akriliđi karıřtırıyoruz ve muflamızın iine yerleřtiriyoruz, ve kapaktaki anahtarların kilit noktalarına tam olarak oturduđuna emin olarak yukardan dik bir řekilde kuvvetle bastırıyoruz ve muflamızı aıyoruz.

 %77 kcltld



2560 x 1920 (1.2mb)

Açtığımızda karşılaşacağımız manzara kenarlara taşmış akrilikler olacak. sınırlara bağlı kalacak şekilde bir spatulle henüz daha yumusakken ayırıyoruz ve aynı işlemi tekrarlıyoruz...


 %64 küçültüldü



1653 x 1397 (671.41k)


Hazırladığımız akrilik sertleştikten sonra aşağıdaki gibi mufladan çıkıyor..

 %58 küçültüldü

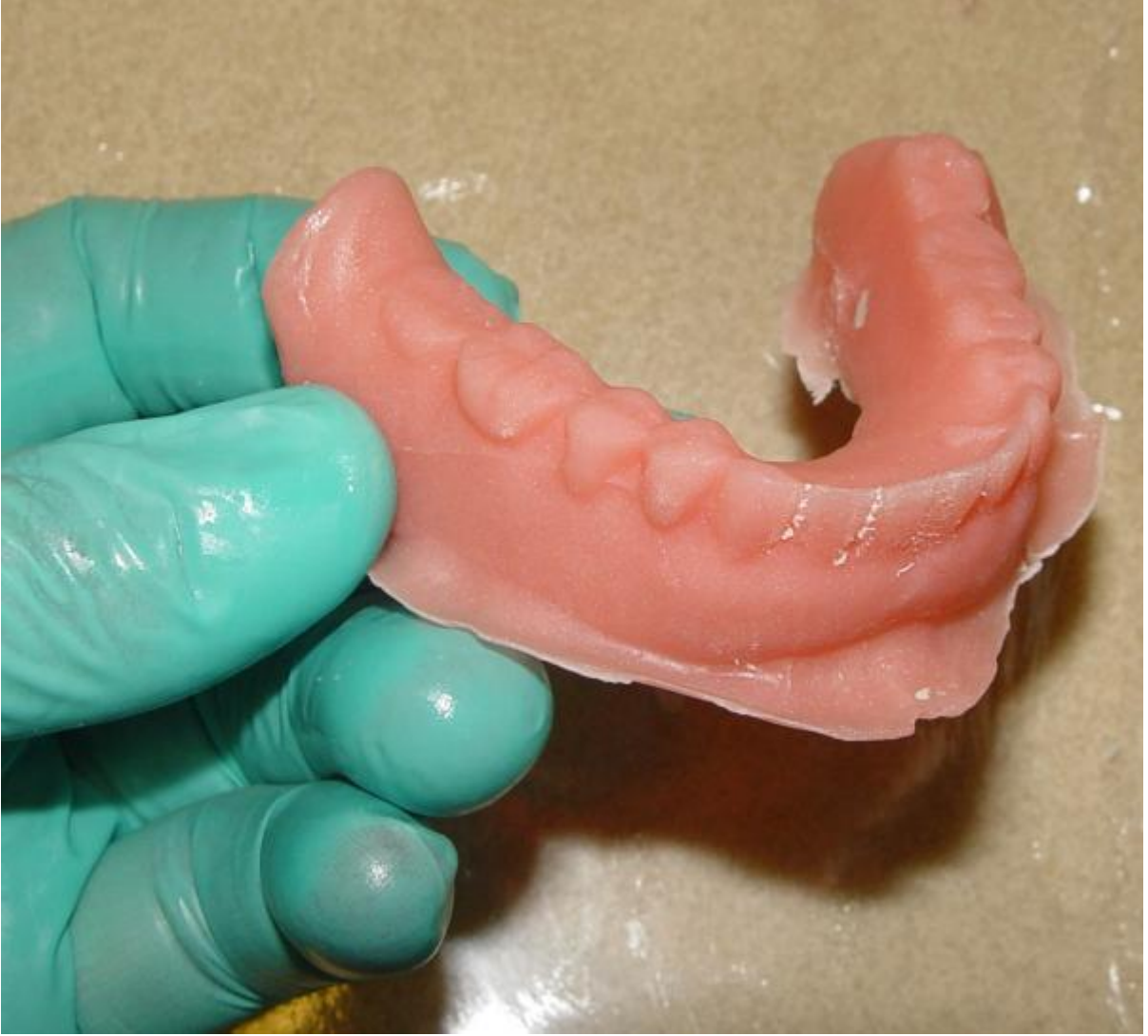

1401 x 1273 (403.38k)


Tam olarak polimerizasyonu sağlamak amaçlı bir süre sıcak suda bekletiyoruz..

 %77 küçültüldü



2560 x 1920 (1.2mb)

daha sonra fazlalıkları aşındırıyoruz ve stentimiz ağza oturacak şekilde hazır oluyor...

 %48 küçültüldü



1145 x 893 (236.12k)

Daha sonra implant planladığımız dişlerin üzerinden akriliği deliyoruz , bu esnada mumkun oldugunca duzgun bir acıyla çok fazla genişletmeden delersek daha sıhhatli oluyor. ve sonuç olarak aşağıdaki stenti elde ediyoruz..

 %67 küçültüldü



1777 x 1497 (449.13k)

Bir gün öncesinden hazırladığımız bu stenti operasyona kadar dezenfektana sarılı olarak bekletiyoruz ve operasyon sırasında , yerleşmesi gereken yerleri belirleme amacıyla işaretleme frezi ile kullanıyoruz...

 %57 küçültüldü



1393 x 1037 (435.46k)

Ars longa, Vita brevis!!!